

# PROTEJA VOCÊ E SEUS CLIENTES.



**UMA EM CADA DEZ**  
**MANICURES TEM HEPATITE.**

## PESQUISA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO PAULO.

*Uma pesquisa mostra que uma em cada dez manicures paulistanas está infectada pelo vírus das Hepatites B ou C, doenças graves transmitidas pelo sangue. Alicates, espátulas e até lixas manipuladas por elas podem ser meios de contaminação.\**

- Todas as manicures usam os instrumentos em si mesmas.
- 85% delas não sabiam que o sangue infectado transmite as hepatites B e C.
- 74% não se vacinaram contra a hepatite B.
- 54% procuram esterilizar seus instrumentos em estufa, mas não o fazem na temperatura e no tempo adequados.
- 26% procuram esterilizar seus instrumentos em autoclave, mas não sabem usá-la corretamente.
- 8% aquecem os instrumentos em fornos de cozinha, o que não surte efeito esterilizador.
- Nenhuma lava as mãos entre um cliente e outro.



Cuba Plástica  
Cristófoli



Lupa com Iluminação  
Modelos Morsa e Pedestal



Seladora  
Cristófoli Plus



Suporte para  
Envelopes



Autoclave Vitale  
12 e 21 Litros



Mini-incubadora  
Cristófoli



Indicador Biológico  
SporTest



Indicador Químico  
SIL-250



Indicador Químico  
Integrador SteamPlus



Indicador Químico  
Emulador TST

## Conheça os produtos Cristófoli



### Cristófoli Equipamentos de Biossegurança Ltda.

Rod. BR 158, nº 127 - Campo Mourão / PR  
CEP 87309-650 - Fone: 44 3518-3431  
0800 44 0800 - [www.cristofoli.com](http://www.cristofoli.com)

Consultoria gratuita em biossegurança:  
[www.cristofoli.com/biosseguranca](http://www.cristofoli.com/biosseguranca)  
[consultoria@cristofoli.com](mailto:consultoria@cristofoli.com)

Liliana Junqueira de P. Donatelli  
Bióloga CRBio 18469/01-D - Mestre em Saúde Coletiva  
Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP

\*Fonte: Oliveira, AODS; Focaccia, R. Survey of hepatitis B and C infection control: procedures at manicure and pedicure facilities in São Paulo, Brazil - Braz J Infect Dis 2010; 14(5):502-507

WWW.CRISTOFOLI.COM

# Como proteger você e seus clientes!

**PASSO A PASSO**





## COMO PROTEGER VOCÊ E SEUS CLIENTES:

# 1

Vacinação contra Hepatite B: Disponível e gratuita em postos de saúde para profissionais do ramo: 1ª dose, 2ª dose após 30 dias, e 3ª dose 6 meses após a 1ª (eficaz em 95%).



# 2

### Use sempre:


- Luvas de procedimento descartáveis para cada cliente. Lave as mãos antes de colocá-las e depois de retirá-las.
- Avental limpo.
- Óculos de proteção.
- Material descartável para cada cliente: lixa de unha e/ou de pé, palito para retirar esmalte, recipiente para água ou kit emoliente para cutícula (luvinha de creme).
- Use um kit esterilizado para cada cliente contendo uma espátula e alicate para cutícula.
- Toalhas limpas ou descartáveis para cada procedimento.



# 3

### Passo a Passo Limpeza e Esterilização dos Instrumentais

Para o procedimento a seguir, utilize luvas grossas de borracha.

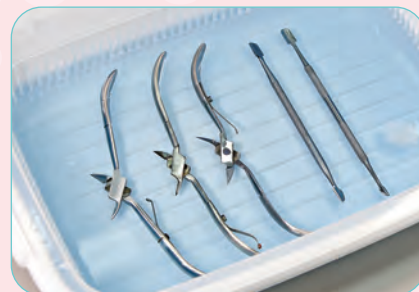

**A** Deixe os instrumentos em imersão em detergente enzimático por dez minutos.



**B** Lave os alicates e as espátulas com escova pequena e de cerdas macias.



**C** Enxágue abundantemente os instrumentais e seque-os com papel toalha.



**G** Proteja as pontas dos alicates com algodão.



**H** Embale cada kit (composto por um alicate e uma espátula) em um envelope.




**I** Posicione os envelopes no suporte (1 em cada espaço).



**D** Inspeção visual. Para maior facilidade utilize uma lente de aumento ou uma lupa. Verifique se o alicate ficou totalmente limpo. Se necessário lave novamente.



**E** Utilize lubrificante próprio para instrumental (Premix-slip®). Não enxágue nem enxugue para não remover a camada protetora.

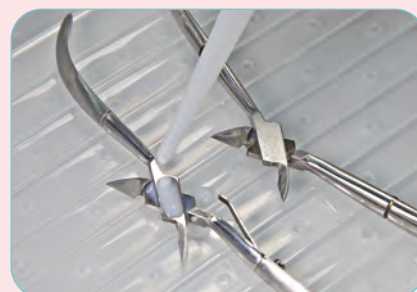

**F** Utilize um borrifador ou gotejador para lubrificar as áreas articuladas. Movimento os alicates para facilitar a penetração do líquido.



**J** Coloque a quantidade de água destilada no copo dosador e despeje diretamente na câmara da autoclave, conforme solicitado no manual de instrução do equipamento.



**K** Com o suporte de envelopes na autoclave realize o ciclo de esterilização conforme as recomendações de uso. Observação: No modelo Amora, o suporte para 5 envelopes acompanha o equipamento. Para os modelos Vitale e Vitale Plus, o suporte é um acessório vendido separadamente e comporta até 13 envelopes 8 x 23 cm no modelo 12 litros e 26 envelopes no modelo 21 litros.



**L** Após a depressurização (Vitale 12/21 e Amora), entreabra a porta para secagem. Para a abertura do modelo Vitale Plus, aguarde a indicação "Esfriando" no display.

## ATENÇÃO!

Autoclave é o equipamento mais recomendado para esterilização de instrumentos que resistam ao calor. Segura e fácil de operar, trabalha com ciclos entre 121° e 134° C de temperatura em presença de vapor e pressão. O tempo médio do ciclo completo, incluindo a etapa de secagem varia entre 35 minutos (Baby) e 1 hora (Vitale / Vitale Plus). Entre em contato conosco pelo e-mail [consultoria@crisstofoli.com](mailto:consultoria@crisstofoli.com) ou através do blog [www.crisstofoli.com/biosseguranca](http://www.crisstofoli.com/biosseguranca)

### DICA! LUVAS GROSSAS

Depois do procedimento, não retire as luvas. Primeiro, lave-as com água e sabão, enxugue com papel toalha e desinfete-as com álcool 70%, somente então retire e guarde-as em local apropriado.