

# INSTRUÇÕES RÁPIDAS

# COMO USAR SUA AUTOCLAVE VITALE CLASS CD 54



**01** Após realizar o Desbloqueio, o equipamento está pronto para o uso.



**02** Para ligar a autoclave, conecte o cabo de energia à rede elétrica e pressione a tecla início. O display exibirá as informações iniciais e emitirá bips.



**03** Serão exibidas mensagens demonstrando a necessidade do monitoramento em cada carga e diária, conforme exigência da RDC 15. Pressione qualquer tecla para continuar a operar o equipamento.



**04** Abra a porta puxando-a e coloque os materiais a serem esterilizados na autoclave. Verifique se o reservatório de abastecimento possui a quantidade suficiente de água destilada para iniciar um programa de esterilização.



**05** Feche a porta da autoclave e selecione o programa desejado pressionando as teclas ◀ e ▶. Pressione a tecla início e empurre a porta segurando-a, será exibida a mensagem TRAVANDO A PORTA.




**06** A autoclave iniciará o abastecimento automático, com a mensagem ABASTECENDO e o tempo decorrido. Em seguida, será exibida a mensagem AQUECENDO e a temperatura.



**07** Assim que a temperatura e pressão de esterilização forem atingidas, o display alternará entre as mensagens ESTERILIZANDO, TEMPO RESTANTE e TEMPO DECORRIDO.



**08** Ao término da esterilização, o display exibirá a mensagem DESPRESSURIZANDO. A secagem acontecerá automaticamente, com a porta fechada, e o display alternará entre as mensagens SECANDO, TEMPO RESTANTE e TEMPO DECORRIDO.

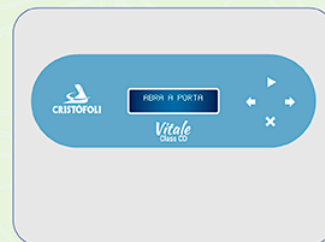

**09** Ao final da secagem, a autoclave emitirá 16 bips e exibirá a mensagem ABRA A PORTA, abra a porta para acelerar o resfriamento. O display alternará entre as mensagens ESFRIANDO, TEMPO RESTANTE e TEMPO DECORRIDO.



**10** Após o término deste processo, a autoclave emitirá 5 bips, o display exibirá as mensagens CICLO CONCLUIDO, com o tempo total do ciclo, e PRESSIONE X. Ao pressionar a tecla Cancela, se o pen drive já estiver conectado, o display exibirá a mensagem TRANSFERINDO DADOS, caso contrário, exibirá CONECTE PEN DRIVE OU e PRESSIONE X, para cancelar a gravação.



**11** Para voltar ao modo de seleção de programa, pressione a tecla Cancela. Para desligar o equipamento, pressione a tecla Cancela por 2 segundos.

## ATENÇÃO

- ✓ A autoclave é um equipamento para esterilização a vapor, trabalha com temperatura e pressão elevadas. Deve ser manuseada por profissionais capacitados e mantida em local de acesso controlado.
- ✓ Realize a manutenção preventiva na autoclave conforme especificado no manual de instruções. Teste sua autoclave com indicadores biológicos a cada 7 dias ou de acordo com a legislação específica.

## Dica

✓ Utilize o Suporte para Envelopes que otimiza a capacidade da autoclave, proporcionando uma esterilização eficiente e secagem perfeita do material, além da economia de energia elétrica, tempo e água destilada.



A instalação da Autoclave Vitale Class CD 54 litros deve ser realizada por uma Assistência Técnica Autorizada Cristófoli.



BLOG  
BIOSSEGURANÇA

www.cristofoli.com/biosseguranca

**CRISTÓFOLI**  
BIOSSEGURANÇA

Cristófoli, a marca  
da proteção.

www.cristofoli.com