

Desbloqueio do Equipamento



Para sua segurança e rastreabilidade, a autoclave Vitale 5 Litros é bloqueada eletronicamente.



Pressione a tecla início para ligar. Após o desbloqueio, deverá realizar o Ajuste de Altitude.



Para desbloqueá-la, acesse o site www.cristofoli.com no submenu Desbloqueio Autoclave e preencha os dados solicitados.



Você receberá o Código de Desbloqueio.



Ao ligar sua autoclave, o logo Cristófoli estará piscando, indicando que permanece bloqueada.



Para efetuar o desbloqueio, a autoclave precisa estar vazia.



Digite o Código de Desbloqueio. A cada tecla pressionada, a autoclave emitirá 1 bip e um novo LED se acenderá. Ao final, a autoclave emitirá 3 bips e o LED ✓ estará aceso, indicando que a autoclave foi desbloqueada, e em seguida, a autoclave será desligada.



Você sabia?

O uso de autoclave é obrigatório para esterilização de artigos em salão de beleza em vários estados. Consulte a Lei 12.592 de 18 de Janeiro de 2012.



Importante!

- 1) Por se tratar de um equipamento que trabalha com temperatura e pressão elevadas, é de extrema importância a realização da Manutenção Preventiva, conforme descrito no Manual de Instrução.
- 2) Utilize somente água destilada na autoclave.