

INSTRUÇÕES RÁPIDAS

COMO USAR SUA AUTOCLAVE Vitale 5 LITROS



1 Após realizar o Desbloqueio e o Ajuste de Altitude, o equipamento está pronto para o uso.




2 Para ligar a autoclave, conecte o cabo de energia à rede elétrica e pressione a tecla **início**. O logo Cristófoli se acenderá e 4 bips soarão.



3 Abra a porta e retire o suporte de envelopes.



4 Utilizando o copo, coloque água destilada na câmara até atingir a marca de nível de água.

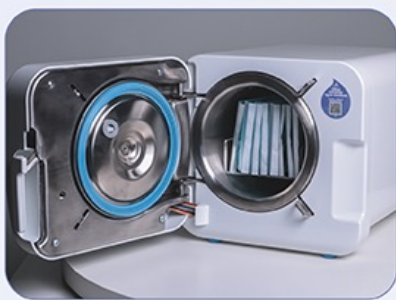

5 Acomode até 8 envelopes de 9 (A) x 26 (L) cm ou 16 envelopes de 10 (A) x 14,5 (L) cm com o uso de dois suportes e posicione-os no interior da câmara.



6 Feche a porta da autoclave, empurrando-a e movendo o fecho totalmente para baixo até o final do curso.



7 Pressione a tecla **início**. A autoclave emitirá 1 bip e o LED **Aquecendo/Secando** estará aceso. Em seguida, a autoclave iniciará o aquecimento.



8 Assim que a temperatura e pressão ideais para o início da esterilização forem atingidas, 1 bip será emitido e você poderá ouvir um estalo, que acontece pelo fechamento da válvula solenoide. A etapa de esterilização se iniciará e o LED **✓** piscará durante essa etapa.



9 Ao término da esterilização, a Autoclave emitirá 1 bip, iniciando a etapa de despressurização e a barra de LEDs indicativos indicará pressão "0" ao final deste processo, emitindo mais 1 bip.



10 Ao iniciar a etapa de secagem, a autoclave emitirá uma sequência de 15 bips, indicando que a porta deverá ser entreaberta para que a secagem possa ser realizada corretamente. É normal que neste momento saia algum vapor pela porta.



11 A autoclave emitirá 1 bip que indica o final do processo de secagem, seguido de mais 3 bips e do LED **✓**, indicando que o ciclo foi concluído. Para desligar o equipamento, pressione a tecla Cancela por 2 segundos.

ATENÇÃO

- ✓ A autoclave é um equipamento para esterilização a vapor, trabalha com temperatura e pressão elevadas. Deve ser manuseada por profissionais capacitados e mantida em local de acesso controlado.
- ✓ Realize a manutenção preventiva na autoclave conforme especificado no manual de instruções.
- ✓ Realize os testes biológicos:
 - Após a instalação, no primeiro uso.
 - Rotina (semanal ou de acordo com a legislação do seu estado ou município para o seu tipo de serviço).
 - Após manutenção preventiva ou corretiva.
- ✓ Após a manutenção ou transferência de local (prédio, cidade, estado), também é necessário realizar um novo Ajuste de Altitude na sua autoclave. Para mais informações, consulte o Manual de Instruções.
- ✓ Para manusear a autoclave utilize luvas de proteção.



✉ cristofoli@cristofoli.com



Blog Biossegurança: www.cristofoli.com/biosseguranca
Consultoria gratuita em biossegurança

Cristófoli,
a marca da proteção.