

Passo a Passo  
para **Limpeza** e  
**Esterilização** dos  
instrumentais  
para  
manicures.



# PROTEJA VOCÊ E SEUS CLIENTES!

E-BOOK



Vacinação contra Hepatite B: Disponível e gratuita em postos de saúde para profissionais do ramo: 1ª dose, 2ª dose após 30 dias, e 3ª dose 6 meses após a 1ª (eficaz em 95%).

# PROTEJA VOCÊ E SEUS CLIENTES!

E-BOOK

## Use sempre:



- Luvas de procedimento descartáveis para cada cliente. Lave as mãos antes de colocá-las e depois de retirá-las.
- Avental limpo.
- Óculos de proteção.
- Material descartável para cada cliente: lixa de unha e/ou de pé, palito para retirar esmalte, kit emoliente para cutícula (luvinha de creme).
- Kit esterilizado para cada cliente contendo uma espátula e alicate para cutícula.
- Toalhas limpas ou descartáveis para cada procedimento.

# PROTEJA VOCÊ E SEUS CLIENTES!

E-BOOK



## Limpeza e Esterilização dos Instrumentais

Para o procedimento a seguir, utilize luvas grossas de borracha.



1

Deixe os instrumentos em **imersão** em detergente enzimático por dez minutos.



2

**Lave** os alicates e as espátulas com escova.





3

**Enxágue** abundantemente os instrumentos e seque-os com papel toalha.

4



**Inspeção visual.** Para maior facilidade utilize uma lente de aumento ou uma lupa. Verifique se o alicate ficou totalmente limpo. Se necessário lave novamente.



5

Utilize **lubrificante** próprio para instrumental (Premix Slip®). Não enxágue nem enxugue para não remover a camada protetora.



6

Utilize um borrifador ou **gotejador** para lubrificar as áreas articuladas. Movimente os alicates para facilitar a penetração do líquido.



7

**Proteja** as pontas dos alicates com **gaze** ou algodão.



8

**Embale cada kit** (composto por um alicate e uma espátula) em um envelope.





9

Posicione os **envelopes** no **suporte** (1 em cada espaço).



10

**Coloque** a quantidade de **água destilada** no copo dosador e despeje diretamente na câmara da autoclave, conforme solicitado no Manual de Instruções do equipamento.



11



Com o suporte de envelopes na autoclave realize o ciclo de **esterilização** conforme as recomendações de uso. Observação: No modelo Vitale 5 litros, um suporte para 8 envelopes acompanha o equipamento. Para os modelos Vitale Class e Vitale Class CD, o suporte é um acessório vendido separadamente e comporta até 13 envelopes 9 x 26 cm no modelo 12 litros e 26 envelopes no modelo 21 litros, utilizando 2 suportes.



Autoclave Vitale 5L

12

Após a despressurização (Autoclave Vitale Class 12/21 e Vitale 5 litros), entreabra a porta para secagem. Para as Autoclaves Vitale Class CD a secagem é automática com porta fechada. Aguarde a indicação “Esfriando” no display para abrir a porta.

## DICA!

### LUVAS GROSSAS

Depois do procedimento, não retire as luvas. Primeiro, lave-as com água e sabão, enxugue com papel toalha e desinfete-as com álcool 70%, somente então retire e guarde-as em local apropriado.



Assista aos vídeos de **Instruções de Uso** e **dicas** sobre **biossegurança**.

## ATENÇÃO!

Autoclave é o equipamento mais recomendado para esterilização de instrumentos que resistam ao calor. Segura e fácil de operar, trabalha com ciclos entre 121° e 134° C de temperatura em presença de vapor e pressão. Entre em contato conosco pelo e-mail [crc@crstofoli.com](mailto:crc@crstofoli.com) ou pelo Blog Biossegurança [www.cristofoli.com/biosseguranca](http://www.cristofoli.com/biosseguranca)



BLOG  
BIOSSEGURANÇA

[www.cristofoli.com/biosseguranca](http://www.cristofoli.com/biosseguranca)



## Conheça os produtos Cristófoli



Autoclave Vitale Class  
12 e 21 Litros



Autoclave Vitale  
5 Litros



Seladora Cristófoli



Mini-Incubadora  
Cristófoli



Indicador Biológico  
SteriTest



Indicador Químico  
SIL-250




Indicador Químico  
Integrador SteamPlus




Envelopes Autosselantes



Embalagens Tubulares  
para Esterilização

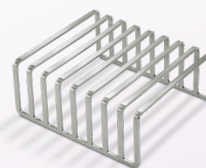

Vitale 5 litros

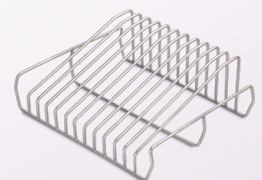

Vitale 12 e 21 litros

Suporte para Envelopes



**Cristófoli Equipamentos  
de Biossegurança Ltda.**

Rua São José, 3209 - Campo Mourão / PR  
CEP 87307-799 ☎ 44 3518-3431

☎ 0800 044 0800 🌐 [www.cristofoli.com](http://www.cristofoli.com)



**BLOG  
BIOSSEGURANÇA**

[www.cristofoli.com/biosseguranca](http://www.cristofoli.com/biosseguranca)

[www.cristofoli.com/biosseguranca](http://www.cristofoli.com/biosseguranca) - [liliana@cristofoli.com](mailto:liliana@cristofoli.com)