



Passo a Passo  
para **Limpeza** e  
**Esterilização** dos  
instrumentais  
para **manicures.**




# PROTEJA VOCÊ E SEUS CLIENTES!

## PASSO A PASSO



Vacinação contra Hepatite B: Disponível e gratuita em postos de saúde para profissionais do ramo: 1ª dose, 2ª dose após 30 dias, e 3ª dose 6 meses após a 1ª (eficaz em 95%).

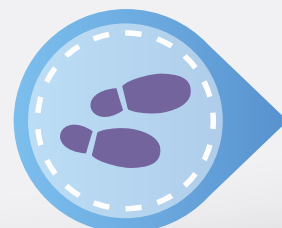




# PROTEJA VOCÊ E SEUS CLIENTES!

## PASSO A PASSO

### Use sempre:



- Luvas de procedimento descartáveis para cada cliente. Lave as mãos antes de colocá-las e depois de retirá-las.
- Avental limpo.
- Óculos de proteção.
- Material descartável para cada cliente: lixa de unha e/ou de pé, palito para retirar esmalte, recipiente para água ou kit emoliente para cutícula (luvinha de creme).
- Kit esterilizado para cada cliente contendo uma espátula e alicate para cutícula.
- Toalhas limpas ou descartáveis para cada procedimento.

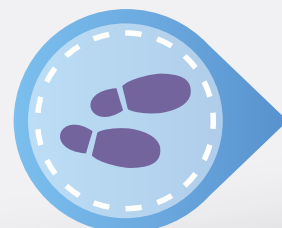


# PROTEJA VOCÊ E SEUS CLIENTES!

## PASSO A PASSO



### **Passo a Passo Limpeza e Esterilização dos Instrumentais**

Para o procedimento a seguir, utilize luvas grossas de borracha.

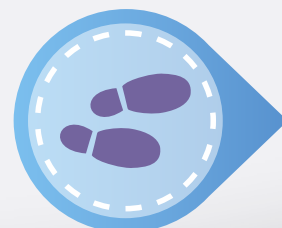



1

Deixe os instrumentos em imersão em detergente enzimático por dez minutos.



2

Lave os alicates e as espátulas com escova pequena e de cerdas macias.





3

Enxágue abundantemente os instrumentais e seque-os com papel toalha.

4



Inspeção visual. Para maior facilidade utilize uma lente de aumento ou uma lupa. Verifique se o alicate ficou totalmente limpo. Se necessário lave novamente.



5

Utilize lubrificante próprio para instrumental (Premix Slip®). Não enxágue nem enxugue para não remover a camada protetora.



6

Utilize um borrifador ou gotejador para lubrificar as áreas articuladas. Movimente os alicates para facilitar a penetração do líquido.





7

Proteja as pontas dos alicates com gaze ou algodão.



8

Embale cada kit (composto por um alicate e uma espátula) em um envelope.



9

Posicione os envelopes no suporte (1 em cada espaço).



10

Coloque a quantidade de água destilada no copo dosador e despeje diretamente na câmara da autoclave, conforme solicitado no Manual de Instruções do equipamento.



# 11



Com o suporte de envelopes na autoclave realize o ciclo de esterilização conforme as recomendações de uso. Observação: No modelo Vitale 5 litros, um suporte para 8 envelopes acompanha o equipamento. Para os modelos Vitale Class e Vitale Class CD, o suporte é um acessório vendido separadamente e comporta até 13 envelopes 9 x 26 cm no modelo 12 litros e 26 envelopes no modelo 21 litros, utilizando 2 suportes.





12

Autoclave Vitale Class

Após a despressurização (Autoclave Vitale Class 12/21 e Vitale 5 litros), entreabra a porta para secagem. Para as Autoclaves Vitale Class CD e Vitale Plus a secagem é automática com porta fechada. Aguarde a indicação “Esfriando” no display para abrir a porta.

## DICA!

### LUVAS GROSSAS

Depois do procedimento, não retire as luvas. Primeiro, lave-as com água e sabão, enxugue com papel toalha e desinfete-as com álcool 70%, somente então retire e guarde-as em local apropriado.

## ATENÇÃO!

Autoclave é o equipamento mais recomendado para esterilização de instrumentos que resistam ao calor. Segura e fácil de operar, trabalha com ciclos entre 121° e 134° C de temperatura em presença de vapor e pressão. Entre em contato conosco pelo e-mail [crc@crstofoli.com](mailto:crc@crstofoli.com) ou pelo Blog Biossegurança [www.-crstofoli.com/biosseguranca](http://www.-crstofoli.com/biosseguranca)




**BLOG  
BIOSSEGURANÇA**

[www.cristofoli.com/biosseguranca](http://www.cristofoli.com/biosseguranca)

# COVID-19 & Beauty

## E-BOOK Biossegurança para Salões de Beleza

Como se preparar para abrir  
as portas do salão de beleza.

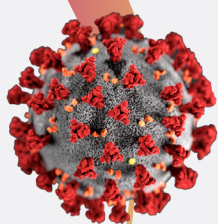

Acesse o vídeo  
Beleza e Saúde  
em suas Mãos:

## Conheça os produtos Cristófoli



Autoclave Vitale Class  
12 e 21 Litros



Mini-Incubadora  
Cristófoli



Indicador Biológico  
SteriTest



Indicador Químico  
SIL-250



Indicador Químico  
Integrador SteamPlus




Envelopes Autosselantes




Seladora Cristófoli



Embalagens Tubulares  
para Esterilização

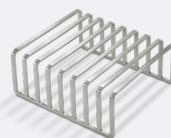

Suporte para Envelopes

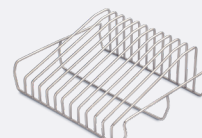





**Cristófoli Equipamentos  
de Biossegurança Ltda.**

Rua São José, 3209 - Campo Mourão / PR  
CEP 87307-799 ☎ 44 3518-3431

☎ 0800 044 0800 🌐 [www.cristofoli.com](http://www.cristofoli.com)



**BLOG  
BIOSSEGURANÇA**

[www.cristofoli.com/biosseguranca](http://www.cristofoli.com/biosseguranca)

**Consultoria gratuita em biossegurança:**

[www.cristofoli.com/biosseguranca](http://www.cristofoli.com/biosseguranca) - [liliana@cristofoli.com](mailto:liliana@cristofoli.com)