

INSTRUÇÕES DE USO

- ▶ Ao produzir os pacotes deixe 2 cm de folga entre as áreas de selagem;
- ▶ Proteja as pontas ativas dos instrumentos com gaze ou algodão para não romper as embalagens;
- ▶ Utilize seladora com área mínima de selagem de 6 mm;
- ▶ Padronize os pacotes;
- ▶ Escreva a data da esterilização no envelope com caneta apropriada;
- ▶ Após a autoclavagem, o indicador rosa deve passar para cor marrom;
- ▶ Para obter melhor limpeza e conservação de seus instrumentos, utilize detergente enzimático e cuba de ultrassom;
- ▶ Monitore sua autoclave com testes biológicos a cada 7 dias.

Condições de Armazenamento

Armazenar em ambiente seco e arejado;
Manter longe dos raios solares;

Temperatura: Entre 18 e 25°C - **Umidade:** Entre 30 e 60%

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail:
consultoria@crisfoli.com

Consultora Cristófoli em Biossegurança - Liliana Junqueira de P. Donatelli
Bióloga CRB 18469/01-D

Data de
Fabricação



**Embalagem de uso único.
Reutilização Proibida**

Data de validade: 2 anos a partir da data de fabricação

Composição do produto:

Papel grau cirúrgico, Polietileno/Polipropileno, resina sintética e tinta (materiais atóxicos).