

## INSTRUCCIONES DE USO

- ▶ Al producir los paquetes deje un espacio de 2 cm entre las áreas de sellado;
- ▶ Proteja las puntas activas de los instrumentos con gasa o algodón para que no rompan el embalaje;
- ▶ Utilice una selladora que tenga una área mínima de sellado de 6 mm;
- ▶ Estandarice los paquetes;
- ▶ Escriba la fecha de la esterilización en el sobre con un bolígrafo adecuado;
- ▶ Después de la autoclavaje, el indicador rosa debe cambiar para marrón;
- ▶ Para una mejor limpieza y conservación de su instrumental, utilice detergente enzimático y una lavadora ultrasónica;
- ▶ Monitore su autoclave con tests biológicos cada 7 días.

### Condiciones de Almacenamiento

Almacenar en ambiente seco y ventilado;

Mantener alejado de los rayos solares;

**Temperatura:** Entre 18 y 25°C - **Humedad:** Entre 30 y 60%

En caso de duda, contactenos a través del e-mail:

[consultoria@crisofoli.com](mailto:consultoria@crisofoli.com)

Consultora Cristófoli en Bioseguridad - Liliana Junqueira de P. Donatelli  
Bióloga CRB 18469/01-D

Fecha de  
Fabricación



**Embalaje de uso único.  
Reutilización Prohibida**

**Fecha de validez:** 2 años a partir de la fecha de fabricación

### Composición del producto:

Papel grado quirúrgico, polietileno/polipropileno, resina sintética y tinta (materiales no tóxicos).